

microlife®



- Звуковой сигнал
- Антисенсорный
- 100% водонепроницаемый


Термометр электронный
медицинский с
золотым наконечником



BB MT 1622 GT EN-RU 3912

GoldTemp Thermometer MT 1622

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT Описание продукта

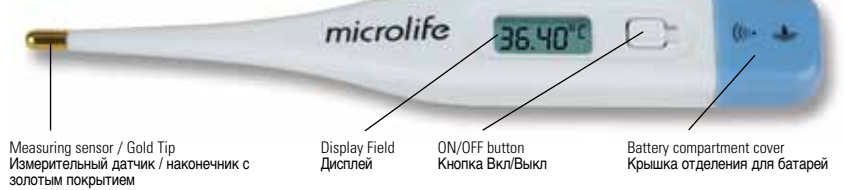

Measuring sensor / Gold Tip
Измерительный датчик / наконечник с золотым покрытием

Display Field
Дисплей

ON/OFF button
Кнопка Вкл/Выкл

Battery compartment cover
Крышка отделения для батарей



Anallergic¹
Антиаллергенный¹



100 % waterproof
100 %-ная водонепроницаемость



Signal Tone
Звуковой сигнал



Memory
Память

¹ no nickel in direct contact with the skin / ¹ нет прямого контакта никеля с кожей

MEASURING METHODS / Способы измерения

Method	Time	Normal Range
Oral орально	60 seconds 1 минута	35.7 °C – 37.3 °C
Rectal ректально	60 seconds 1 минута	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar аксиллярно	60 seconds* 1 минута*	35.2 °C – 36.7 °C

* A minimum measurement time of 3-5 minutes is recommended regardless of the beep sound.
* Рекомендуется соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо от звукового сигнала.

CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция

Name / Средства	Immerse / Погружение
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours
Спирт этиловый для наружного применения	Погружение на 24 часа

BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ

When the «▼»-symbol appears, the battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometer and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.



Read the instructions carefully before using this device.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.



Type BF applied part
Класс защиты BF

Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com
www.microlife.ru

120

microlife®



guarantee
(excl. battery)

Термометр медицинский электронный
CLINICALLY TESTED

CE0044

